



KIJIMEA®

COLON IRRITABILE PRO



Istruzioni per l'uso Kijimea® Colon Irritabile PRO

 **Leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso, poiché contengono informazioni importanti. Questo dispositivo medico è disponibile senza prescrizione medica. Per ottenere il miglior effetto terapeutico, tuttavia Kijimea® Colon Irritabile PRO deve essere utilizzato secondo le istruzioni.**

- Conservare queste istruzioni per l'uso, nel caso in cui ci fosse il bisogno di consultarle nuovamente.
- Per maggiori informazioni e consigli, rivolgersi al proprio farmacista.
- Consultare il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano.

Queste istruzioni per l'uso contengono le seguenti informazioni:

1. Per che cosa si usa Kijimea® Colon Irritabile PRO e quali sono i suoi benefici clinici?
2. Per chi è indicato Kijimea® Colon Irritabile PRO?
3. A che cosa deve prestare attenzione prima dell'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO?
4. Come assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO?
5. Quali sono i possibili effetti collaterali?
6. Come deve essere conservato Kijimea® Colon Irritabile PRO?
7. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Per che cosa si usa Kijimea® Colon Irritabile PRO e quali sono i suoi benefici clinici?

Kijimea® Colon Irritabile PRO è un dispositivo medico e contiene il ceppo bifidobatterico *B. bifidum* HI-MIMBb75 inattivato termicamente.

È usato per il trattamento della sindrome del colon irritabile con i sintomi tipici di stitichezza, diarrea, dolore addominale, flatulenza e gonfiore addominale.

Il dispositivo medico allevia la sindrome del colon irritabile stessa e i sintomi tipici di stitichezza, diarrea, dolore addominale, flatulenza e gonfiore addominale, e migliora significativamente la qualità della vita.

2. Per chi è indicato Kijimea® Colon Irritabile PRO?

Kijimea® Colon Irritabile PRO deve essere assunto dalle persone che soffrono di sindrome del colon irritabile, con i sintomi tipici di stitichezza, diarrea, dolore addominale, flatulenza e gonfiore addominale, o che hanno ricevuto una diagnosi di tale condizione.

Chi assume Kijimea® Colon Irritabile PRO dovrebbe essere in grado di deglutire la capsula intera.

Durante la gravidanza o l'allattamento

Kijimea® Colon Irritabile PRO non è stato specificamente testato su donne in gravidanza o in allattamento.

Bambini

Kijimea® Colon Irritabile PRO non è stato specificamente testato su bambini.

Pazienti con allergie o pazienti diabetici

Kijimea® Colon Irritabile PRO non contiene conservanti, dolcificanti, aromatizzanti, lattosio, fruttosio o glutine. Kijimea® Colon Irritabile PRO è adatto anche per i pazienti con diabete.

3. A che cosa deve prestare attenzione prima dell'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO?

Assuma sempre Kijimea® Colon Irritabile PRO esattamente come indicato in queste istruzioni per l'uso. Si rivolga al Suo medico o farmacista se ha dei dubbi.

Avvertenze/misure precauzionali

Kijimea® Colon Irritabile PRO non può essere assunto:

- Senza una quantità sufficiente di liquido.
- Dopo il superamento della data di scadenza indicata sulla confezione .
- In caso di ipersensibilità nota a uno degli ingredienti del preparato.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni note all'uso del prodotto.

Assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO assieme a medicinali

Non sono note interazioni farmacologiche. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO in concomitanza con medicinali.

Altre informazioni

Nel caso in cui i disturbi ricompaiano o persistano, è necessario consultare un medico in modo che accerti la causa dei disturbi e una eventuale patologia latente che richiede un trattamento.



KIJIMEA®

COLON IRRITABILE PRO



4. Come assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO?

Salvo diversa prescrizione del medico, per Kijimea® Colon Irritabile PRO sono applicabili le seguenti informazioni.

Assuma due capsule di Kijimea® Colon Irritabile PRO 1 volta al giorno senza masticarle con una quantità sufficiente di liquido (ad es. 1 bicchiere d'acqua).

Per ottenere i migliori risultati, Kijimea® Colon Irritabile PRO deve essere assunto per almeno quattro settimane, meglio per dodici settimane. Dopo circa una settimana di assunzione regolare, si dovrebbe osservare un primo sollievo dai disturbi.

5. Quali sono i possibili effetti collaterali?

Attualmente non sono noti effetti collaterali, anche in caso di sovradosaggio. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare il prodotto come prescritto.

I sintomi della sindrome del colon irritabile possono essere soggetti a fluttuazioni naturali nel loro decorso e variano sia nella loro manifestazione sia nella loro intensità. Inoltre, vari fattori esterni (ad es. dieta non abituale e stress) possono intensificare i sintomi. Di conseguenza, in singoli casi, si può verificare un temporaneo peggioramento dei sintomi tipici del colon irritabile durante l'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO.

Se dovesse notare effetti collaterali, li segnali a Synformulas GmbH . Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al prodotto deve essere segnalato a Synformulas GmbH e all'autorità competente dello Stato membro di appartenenza.¹

6. Come deve essere conservato Kijimea® Colon Irritabile PRO?

Questo prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

7. Contenuto della confezione e altre informazioni

Kijimea® Colon Irritabile PRO contiene il ceppo bifidobatterico *B. bifidum* HI-MIMBb75 inattivato termicamente (0,5 x 10⁹ batteri per capsula).

Gli altri componenti sono: amido di mais, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, biossido di silicio, complessi di clorofillina contenenti rame.

¹L'autorità competente in Italia è l'Ufficio 5 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGFD) del Ministero della Salute. La Synformulas GmbH inoltrerà tutte le segnalazioni di incidenti gravi all'autorità competente.



KIJIMEA®

DALLA RICERCA. PER LA TUA SALUTE.



Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Germania
Tel.: 800 - 14 17 28
info@synformulas.it • www.kijimea.it

SYNformulas

FUTRUE

KRP-IT-BPZ-V015



Ultimo aggiornamento dell'informazione:
settembre 2026