



Leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso, poiché contengono informazioni importanti. Questo dispositivo medico può essere acquistato senza prescrizione medica. Kijimea® Colon Irritabile PRO deve essere tuttavia utilizzato correttamente per un esito ottimale del trattamento.

- Conservare queste istruzioni per l'uso, nel caso in cui ci fosse il bisogno di consultarle nuovamente.
- Per maggiori informazioni e consigli, rivolgersi al proprio farmacista.
- Consultare il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano.

Queste istruzioni per l'uso contengono le seguenti informazioni:

1. Che cos'è Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule e perché si usa
2. A cosa bisogna prestare attenzione prima di assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule
3. Come si utilizza Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come si conserva Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule e qual è la sua scadenza
6. Ulteriori informazioni

1. Che cos'è Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule e perché si usa

Questo dispositivo medico contiene il ceppo di bifidobatteri inattivati termicamente *B. bifidum* HI-MIMBb75. Si usa per il trattamento della sindrome del colon irritabile con i sintomi caratteristici di stitichezza, diarrea, dolori addominali, flatulenze e meteorismo.

2. A cosa bisogna prestare attenzione prima di assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule

Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule non contiene conservanti, edulcoranti, aromi, lattosio, fruttosio o glutine e può essere assunto senza problemi anche da pazienti diabetici.

Durante la gravidanza e l'allattamento

Non vi sono dati noti che sconsiglino l'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule durante la gravidanza e l'allattamento.

Nei bambini

Non vi sono dati noti che sconsiglino l'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule da parte di bambini e adolescenti.

Assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule con medicinali

Non sono note interazioni con medicinali. Consultare il medico o farmacista se si sta assumendo, si ha recentemente assunto o si intende assumere altri medicinali.

Altre avvertenze

Consultare il medico in caso di nuovi disturbi o disturbi persistenti, così da accertarne la causa e l'eventuale patologia generale da trattare. Il prodotto non deve essere assunto se si è allergici a uno qualsiasi dei componenti.

3. Come si utilizza Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule

Assumere sempre Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule

attendendosi esattamente alle informazioni riportate in queste istruzioni per l'uso. In caso di dubbi, consultare il proprio medico o farmacista.

Le seguenti istruzioni sono valide salvo diversa prescrizione di Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule da parte del medico. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso, poiché in caso contrario Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule può non agire in modo efficace!

Assumere due capsule di Kijimea® Colon Irritabile PRO 1 volta al giorno senza masticare e con una quantità sufficiente di liquido (ad es. un bicchiere d'acqua).

Per un risultato ottimale, assumere Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule per almeno quattro settimane, preferibilmente tuttavia per dodici settimane. Un primo sollievo dai disturbi dovrebbe verificarsi dopo circa una settimana di regolare assunzione.



4. Possibili effetti indesiderati

Non sono stati sinora osservati effetti indesiderati correlati all'uso di Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule.

L'intensità e il manifestarsi dei sintomi della sindrome del colon irritabile possono variare naturalmente. Anche fattori esterni (p. es. alimentazione scorretta e stress) possono acuire i sintomi. Per questo motivo durante l'assunzione di Kijimea® Colon Irritabile PRO si può verificare in alcuni casi un peggioramento dei tipici sintomi del colon irritabile.

Si prega di comunicare effetti indesiderati al produttore indicato in queste istruzioni per l'uso.

5. Come si conserva Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule e qual è la sua scadenza

Conservare Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule a temperatura inferiore a 25 °C \downarrow ^{25°C}, in luogo asciutto . Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non usare Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule dopo la data di scadenza riportata sulla confezione .

6. Ulteriori informazioni

Kijimea® Colon Irritabile PRO capsule contiene il ceppo di bifidobatteri inattivati termicamente *B. bifidum* HI-MIMBb75. Gli eccipienti sono: amido di mais, ipromellosa, stearato di magnesio, biossido di silicio, complessi delle clorofilline con rame. Kijimea® Colon Irritabile PRO è disponibile in confezioni da 14, 28 e 84 capsule.

Kijimea®: per la salute e l'ambiente.

Kijimea® attribuisce importanza ad una gestione delle risorse responsabile. Il foglio illustrativo e la confezione sono composti da carta riciclata al 100%.



È un dispositivo medico



 Produttore/distributore:

Synformulas GmbH
Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Germania
Tel.: 800 - 14 17 28
Fax: 800 - 14 17 76
info@synformulas.it • www.kijimea.it

Stato: agosto 2020